

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ BRÝLOVÝCH OBRUB

obecný návod pro uvedené značky a modelové řady

Identifikace

Distributor	Ing. Jiří Chyba
Výrobce / značky	OXYBIS - Oxibis, Exalto, Dilem, Jooly
Výrobce / značka	INTRATECH S.r.l. - Incredible

Určení výrobku

Brýlové obruby jsou určeny k odbornému osazení brýlovými čočkami a ke korekci zraku podle předpisu nebo doporučení očního specialisty. Výběr velikosti, typu čoček, centraci a konečné seřízení musí provést oční optik.

Základní pravidla používání

- obruby používejte pouze k účelu, pro který byly určeny; nejsou ochrannými brýlemi proti nárazu, prachu, chemikáliím ani teplu;
- brýle nasazujte i sundávejte oběma rukama a uchopte je za obě stranice současně;
- nenoste brýle volně v kapse nebo tašce bez pouzdra, nepokládejte je čočkami dolů a nesedejte si na ně;
- nepoužívejte nadměrnou sílu u pružných pantů, klipů ani jiných doplňků;
- nepřibližujte obruby k silným magnetům, zdrojům tepla, otevřenému ohni ani k elektrickým zařízením, kde by mohlo dojít k poškození;
- nevystavujte obruby dlouhodobě vysokým teplotám, mrazu, páře, sauně, kadeřnickým procedurám ani chemickým výparům;
- uchovávejte mimo dosah malých dětí; náhodné poškození může způsobit poranění.

Kdy vyhledat optika

- obruba sedí nakřivo, sklouzává, tlačí, je uvolněná nebo došlo ke změně usazení čoček;
- šroubky, sedla, koncovky, stranice, klipy nebo jiné díly jsou uvolněné, poškozené nebo chybí;
- došlo k pádu, deformaci nebo prasknutí části obruby;
- výrobek vykazuje známky opotřebení, které mohou ovlivnit bezpečné používání.

Údržba a seřízení

U očního optika nechte pravidelně zkontrolovat celkový technický stav obruby, zejména její seřízení a dotažení všech šroubků. Veškeré opravy a výměny dílů provádějte pouze s vhodnými náhradními díly.

Čištění

- čistěte měkkým hadříkem z mikrovlákn a přípravkem určeným pro brýle;
- při větším znečištění opláchněte obrubu vlažnou vodou a opatrně osušte;
- nepoužívejte alkohol, aceton, ředidla, agresivní čističe, abrazivní prostředky ani hrubé textilie;
- po kontaktu s potem, kosmetikou, lakem na vlasy, mořskou vodou nebo chemickými látkami obruby co nejdříve očistěte.

Materiály, komfort a bezpečnost

- materiály mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci; při podráždění pokožky brýle přestaňte používat a poraďte se s optikem nebo lékařem;
- bolest, otlaky za ušima nebo na nose obvykle znamenají nevhodné seřízení nebo velikost obruby;
- výrobek znečištěný biologickým materiálem může být zdrojem infekce; udržujte jej čistý;
- přirozené opotřebení, změna barvy nebo povrchové změny způsobené používáním, kosmetikou, potem či teplem nejsou vadou výrobku.

Obsah balení

Brýlová obruba	1 ks obruba, 1 ks návod; pouzdro dle dodávky
Obruba s klipem	1 ks obruba, 1 ks sluneční / polarizační klip, 1 ks návod; pouzdro dle dodávky

Poznámka

Tento návod je obecný pro uvedené značky a modelové řady. Konkrétní materiál, konstrukce a doporučené zacházení se mohou podle modelu lišit; vždy respektujte informace výrobce a pokyny svého optika.

NÁVOD K POUŽITÍ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

obecný návod pro uvedené značky a modelové řady

Identifikace

Distributor	Ing. Jiří Chyba
Výrobce / značky	OXYBIS - Oxibis, Exalto, Dilem, Jooly
Výrobce / značka	INTRATECH S.r.l. - Incredible

Určení výrobku

Sluneční brýle jsou určeny pro běžné používání jako ochrana očí před slunečním zářením a oslněním. Nejsou určeny jako ochranné pracovní brýle, sportovní štít, prostředek proti mechanickému nárazu ani jako pomůcka pro sledování zatmění slunce.

Soulad a označení

Výrobky označené CE jsou uváděny na trh jako osobní ochranný prostředek pro všeobecné použití. U slunečních brýlí se sleduje zejména ochrana před UV zářením, kategorie filtru a vhodnost pro řízení nebo běžný provoz.

Nevhodné použití

- nedívejte se přímo do slunce, do solária, horského slunce ani na zatmění slunce;
- nepoužívejte brýle jako ochranu proti nárazu, jiskrák, chemikáliím nebo prachu;
- neřídte v noci ani za šera; u kategorie filtru 4 neřídte vůbec a nepoužívejte je v silničním provozu;
- nenechávejte brýle na palubní desce auta, u radiátoru nebo na jiném místě s vysokou teplotou;

Péče a údržba

- čistěte měkkým hadříkem z mikrovlákna; při větším znečištění brýle nejprve opláchněte vlažnou vodou;
- používejte pouze prostředky doporučené pro brýlové čočky;
- nepoužívejte rozpouštědla, alkohol, aceton, agresivní čističe ani papírové utěrky;
- ukládejte brýle do pouzdra a nepokládejte je skly dolů;
- opravy, výměny dílů a seřízení nechte provést u očního optika.

Kategorie slunečních filtrů

Konkrétní kategorie filtru je uvedena na výrobku, štítku nebo v průvodní dokumentaci. Nižší propustnost světla znamená tmavší filtr, nikoliv automaticky vyšší UV ochranu. Při výběru vždy zohledněte prostředí, ve kterém budete brýle používat.

Podrobná tabulka kategorií je uvedena níže na této stránce.

Doporučení k používání

- brýle nasazujte a sundávejte oběma rukama, aby nedocházelo ke kroucení obruby;
- pokud brýle nesedí, tlačí nebo jsou uvolněné, nepřihýbejte je násilím a navštivte optika;
- po kontaktu se slanou vodou, potem, krémy nebo kosmetikou brýle jemně opláchněte a osušte;
- poškozené, prasklé nebo výrazně poškrábané brýle dále nepoužívejte.

Obsah balení

Základní balení	1 ks sluneční brýle, 1 ks návod k použití
Dle modelu	pouzdro, hadřík nebo další příslušenství, pokud je součástí dodávky

Poznámka

Tento návod je obecný pro uvedené značky a modelové řady. Vždy respektujte také informace uvedené přímo na výrobku, na štítku nebo v dokumentaci konkrétního modelu.

Doporučené použití podle kategorie filtru

Kategorie filtru	Propustnost světla	Popis	Doporučené použití	Poznámka
0	80-100 %	velmi slabé zabarvení	tlumený jas	nevhodné pro řízení v noci a za zhoršené viditelnosti
1	43-80 %	slabé zabarvení	nízký jas	nevhodné pro řízení v noci a za zhoršené viditelnosti
2	18-43 %	střední zabarvení	střední jas	nevhodné pro řízení v noci a za zhoršené viditelnosti
3	8-18 %	tmavé zabarvení	vysoký jas	nevhodné pro řízení v noci a za zhoršené viditelnosti
4	3-8 %	velmi tmavé zabarvení	mimořádně vysoký jas	nevhodné pro řízení a provoz na silnici