

# NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ BRÝLOVÝCH OBRUB

obecný návod pro uvedené značky a modelové řady

## Identifikace

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Distributor      | Ing. Jiří Chyba                       |
| Výrobce / značky | OXIBIS - Oxibis, Exalto, Dilem, Jooly |
| Výrobce / značka | INTRATECH S.r.l. - Incredible         |

## Určení výrobku

Brýlové obruby jsou určeny k odbornému osazení brýlovými čočkami a ke korekci zraku podle předpisu nebo doporučení očního specialisty. Výběr velikosti, typu čoček, centraci a konečné seřízení musí provést oční optik.

## Základní pravidla používání

- obruby používejte pouze k účelu, pro který byly určeny; nejsou ochrannými brýlemi proti nárazu, prachu, chemikáliím ani teplu;
- brýle nasazujte i sundávejte oběma rukama a uchopte je za obě stranice současně;
- nenoste brýle volně v kapse nebo tašce bez pouzdra, nepokládejte je čočkami dolů a nesedejte si na ně;
- nepoužívejte nadměrnou sílu u pružných pantů, klipů ani jiných doplňků;
- nepřibližujte obruby k silným magnetům, zdrojům tepla, otevřenému ohni ani k elektrickým zařízením, kde by mohlo dojít k poškození;
- nevystavujte obruby dlouhodobě vysokým teplotám, mrazu, páře, sauně, kadeřnickým procedurám ani chemickým výparům;
- uchovávejte mimo dosah malých dětí; náhodné poškození může způsobit poranění.

## Kdy vyhledat optika

- obruba sedí nakřivo, sklouzává, tlačí, je uvolněná nebo došlo ke změně usazení čoček;
- šroubky, sedla, koncovky, stranice, klipy nebo jiné díly jsou uvolněné, poškozené nebo chybí;
- došlo k pádu, deformaci nebo prasknutí části obruby;
- výrobek vykazuje známky opotřebení, které mohou ovlivnit bezpečné používání.

## Údržba a seřízení

U očního optika nechte pravidelně zkontrolovat celkový technický stav obruby, zejména její seřízení a dotažení všech šroubků. Veškeré opravy a výměny dílů provádějte pouze s vhodnými náhradními díly.

## Čištění

- čistěte měkkým hadříkem z mikrovlákn a přípravkem určeným pro brýle;
- při větším znečištění opláchněte obrubu vlažnou vodou a opatrně osušte;
- nepoužívejte alkohol, aceton, ředidla, agresivní čističe, abrazivní prostředky ani hrubé textilie;
- po kontaktu s potem, kosmetikou, lakem na vlasy, mořskou vodou nebo chemickými látkami obruby co nejdříve očistěte.

## Materiály, komfort a bezpečnost

- materiály mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci; při podráždění pokožky brýle přestaňte používat a poraďte se s optikem nebo lékařem;
- bolest, otlaky za ušima nebo na nose obvykle znamenají nevhodné seřízení nebo velikost obruby;
- výrobek znečištěný biologickým materiálem může být zdrojem infekce; udržujte jej čistý;
- přirozené opotřebení, změna barvy nebo povrchové změny způsobené používáním, kosmetikou, potem či teplem nejsou vadou výrobku.

## Obsah balení

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brýlová obruba  | 1 ks obruba, 1 ks návod; pouzdro dle dodávky                                   |
| Obruba s klipem | 1 ks obruba, 1 ks sluneční / polarizační klip, 1 ks návod; pouzdro dle dodávky |

## Poznámka

Tento návod je obecný pro uvedené značky a modelové řady. Konkrétní materiál, konstrukce a doporučené zacházení se mohou podle modelu lišit; vždy respektujte informace výrobce a pokyny svého optika.